

DIE SCHIENE MIT THERMO-EFFEKT

 **primotec**[®]
DIGITAL

**begeisterte
Patienten**

**zufriedene
Behandler**

**entspannte
Techniker**



PREMIOtemp CLEAR FLEX

Nichts drückt, nichts spannt,

die gefräste PREMIOtemp CLEAR FLEX Schiene ist einfach nur besonders angenehm zu tragen.

PATIENTENINFORMATION



CLEAR FLEX

DIE BRUCHSICHERE AUFBISSSCHIENE MIT THERMO-EFFEKT

PREMIO



Maximale Bruchsicherheit bei Körpertemperatur durch thermoplastische Flexibilität

TOP EIGENSCHAFTEN

IHRE VORTEILE



Memory-Effekt: 100 % Rückstellung bei Körpertemperatur ohne Verlust der Oberflächenhärte

- Spannungsfreier Tragekomfort und präzise Passung durch Thermo-Effekt
- Sehr langlebig – maximale Bruchsicherheit durch Memory-Effekt – bruchstabiler als die meisten herkömmlichen PMMA-Kunststoffe
- Hohe Transparenz für nahezu unsichtbares Tragen
- Sehr geringe Plaque-Affinität

CLEAR FLEX

CLEAR FLEX

**Die gefräste PREMIOtemp
CLEAR FLEX Schiene von primotec**

Pflegehinweise:

- Reinigen Sie Ihre CLEAR-FLEX-Schiene nach jedem Tragen unter fließendem Wasser mit einer Zahnbürste
- Lagern Sie Ihre Schiene bei Nichttragen in einem Glas Wasser
- Verwenden Sie keine Prothesenreiniger
- Legen Sie die Schiene zum komfortablen Einsetzen zunächst in 40 - 50 °C warmes Wasser
- Schützen Sie die Schiene vor großer Hitze und Kälte



primotec[®]
DIGITAL

Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99
primotec@primogroup.de
www.primogroup.de