

# DIE SCHIENE MIT THERMO-EFFEKT

 **primotec**<sup>®</sup>  
DIGITAL

**begeisterte  
Patienten**

**zufriedene  
Behandler**

**entspannte  
Techniker**



## PREMIOtemp CLEAR FLEX

**Nichts drückt, nichts spannt,**

die gefräste PREMIOtemp CLEAR FLEX Schiene ist einfach nur besonders angenehm zu tragen.

### PATIENTENINFORMATION



# CLEAR FLEX

# DIE BRUCHSICHERE AUFBISSSCHIENE MIT THERMO-EFFEKT

PREMIO



**Maximale Bruchsicherheit** bei Körpertemperatur durch thermoplastische Flexibilität

## TOP EIGENSCHAFTEN

### IHRE VORTEILE



**Memory-Effekt:** 100 % Rückstellung bei Körpertemperatur ohne Verlust der Oberflächenhärte

- Spannungsfreier Tragekomfort und präzise Passung durch Thermo-Effekt
- Sehr langlebig – maximale Bruchsicherheit durch Memory-Effekt – bruchstabiler als die meisten herkömmlichen PMMA-Kunststoffe
- Hohe Transparenz für nahezu unsichtbares Tragen
- Sehr geringe Plaque-Affinität

# CLEAR FLEX

# CLEAR FLEX

## Die gefräste PREMIOtemp CLEAR FLEX Schiene von primotec

### **Pflegehinweise:**

- Reinigen Sie Ihre CLEAR-FLEX-Schiene nach jedem Tragen unter fließendem Wasser mit einer Zahnbürste
- Lagern Sie Ihre Schiene bei Nichttragen trocken und dunkel, NICHT im Wasserglas
- Verwenden Sie keine Prothesenreiniger – alkoholbasierte Reiniger
- Legen Sie die Schiene zum komfortablen Einsetzen zunächst in 40 - 50 °C warmes Wasser
- Schützen Sie die Schiene vor großer Hitze und Kälte



**primotec**<sup>®</sup>  
DIGITAL

Joachim Mosch e.K.  
Tannenwaldallee 4  
D-61348 Bad Homburg  
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0  
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99  
primotec@primogroup.de  
www.primogroup.de