



primotec®


advanced laboratory systems

primobyte

Lichhärtendes Bissregistratmaterial



primobyte

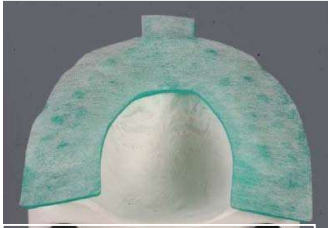

1. primobyte Registrat-Träger auf OK-Modell adaptieren



2. den Artikulator (gipslose Modellfixierung) fest schließen



3. den so perfekt adaptierten Träger 3-6 Minuten lichthärten



4. fertigen Registrat-Träger im Mund auf perfekten Sitz prüfen



5. primobyte Detailpaste (lichthärtend) für anteriore Stopps auftragen



6. im Artikulator mehrmals in Zentrik führen, dann die Stopps lichthärten



7. bei den posterioren Stopps gleichermaßen vorgehen



8. fertiges Registrat mit Shimstockfolie abschließend prüfen

Lichthärtende **primobyte** Registrat-Träger stellen durch ihre Beschaffenheit eine minimale Sperrung der Vertikalen bei der Bissregistrierung sicher, denn sie sind extrem dünn, dennoch hoch form- und dimensionsstabil. Sie sind fest und temperaturunempfindlich und bleiben lange erhalten, sodass in der Regel nur ein Registrat benötigt wird.

primobyte Registrat-Träger setzen sich zusammen aus dem Registrat-Träger und der Detailpaste.

Die **primobyte** Registrat-Träger sorgen für eine perfekte Passung ohne merkliche Polymerisationsschrumpfung, denn das Material wurde speziell für die Anwendung *Bissregistrat* entwickelt. Sie können im Labor vorbereitet werden. So reduziert sich der Zeitaufwand des Behandlers bei der Registrierung.

Die **primobyte** Detailpaste ist im Registrierzustand sehr weich und plastisch, ohne zu „verlaufen“, sie zeichnet mit höchster Detailgenauigkeit und klebt nicht an den Antagonisten. Im Gegensatz zu Aluwachs bestimmt bei primobyte der Behandler, wann das Material fest wird (durch Polymerisation).

Primobyte Registrat-Träger sind geruchs- und geschmacks-neutral, sparsam in der Anwendung, dabei hocheffizient und bietet auf Antrieb 1a-Ergebnisse. primobyte ist so einfach in der Handhabung, dass die Bissregistrierung damit zum Vergnügen wird!

Bestellcoupon

Bestellung einfach ausfüllen
und faxen an: +49 (0)6172 / 99 770 - 99

PB001 primobyte Start Set zum Preis € 199,80

bestehend aus: 36 Stück primobyte Registrat-Träger
6 Stück primobyte Detailpaste in Spritzen je 3 gr.

Praxis / Labor

Straße

PLZ, Ort

Fon

Fax

Email

Datum/Stempel/Unterschrift

primotec Joachim Mosch e.K. · Tannenwaldallee 4
D-61348 Bad Homburg · Fon +49 (0) 61 72 - 99 770 - 0
Fax +49 (0) 61 72 - 99 770 - 99 · primotec@primogroup.de

CE