

nie wieder "Schaukler" oder "Wipper"

mit den fünf unterschiedlich abgewinkelten quinto Armen können alle Teile einer zahntechnischen Arbeit perfekt in Position gehalten werden



Joachim Mosch e.K.
Tannenwaldallee 4
D-61348 Bad Homburg / Germany
Tel. +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 0
Fax +49 (0) 61 72 - 99 77 0 - 99

primotec@primogroup.de
www.primogroup.de

NIE WIEDER "SCHAUKLER" ODER "WIPPER"

quinto

die dritte Hand

Der quinto ist eine hoch präzise und gleichzeitig einfache Lösung zur Fixierung selbst komplexer zahntechnischer Arbeiten auf dem Modell.

NIE WIEDER "SCHAUKLER" ODER "WIPPER"




www.primogroup.de

Anwendungsgebiete

- fixiert und sichert selbst komplexe zahntechnische Arbeiten ganz einfach und präzise auf dem Modell
- hält die Einzelteile einer getrennten Brücke zum Fixierschweißen exakt in Position
- vereinfacht wesentlich das Verkleben z.B. einer Galvano Mesiostruktur mit dem tertiären Modellgussgerüst
- hilft zuverlässig, eine gegossene Modellgusserweiterung zum Verschweißen mit der Basis in Position zu halten
- stellt sicher, dass die Modelle vor dem Einartikulieren zentrisch fixiert bleiben

Vorteile

- verhindert "Schaukler" oder "Wipper" aufgrund unzureichender oder falscher Fixierung
- hält alle fixierten Teile sicher in Position, so dass der Anwender beide Hände zum Arbeiten frei hat
- sorgt für verzugfreies, gleichmäßiges Aushärten von Klebewachs oder Heißkleber
- keine Probleme beim Einartikulieren
- keine Wartezeit während Kleber oder Kunststoff aushärten.
- spart Zeit und steigert die Produktivität
- individuell einstellbar für jegliche zahntechnische Arbeiten
- kann direkt per Anschlussbuchse mit dem phaser Mikroimpulsschweißgerät verbunden werden

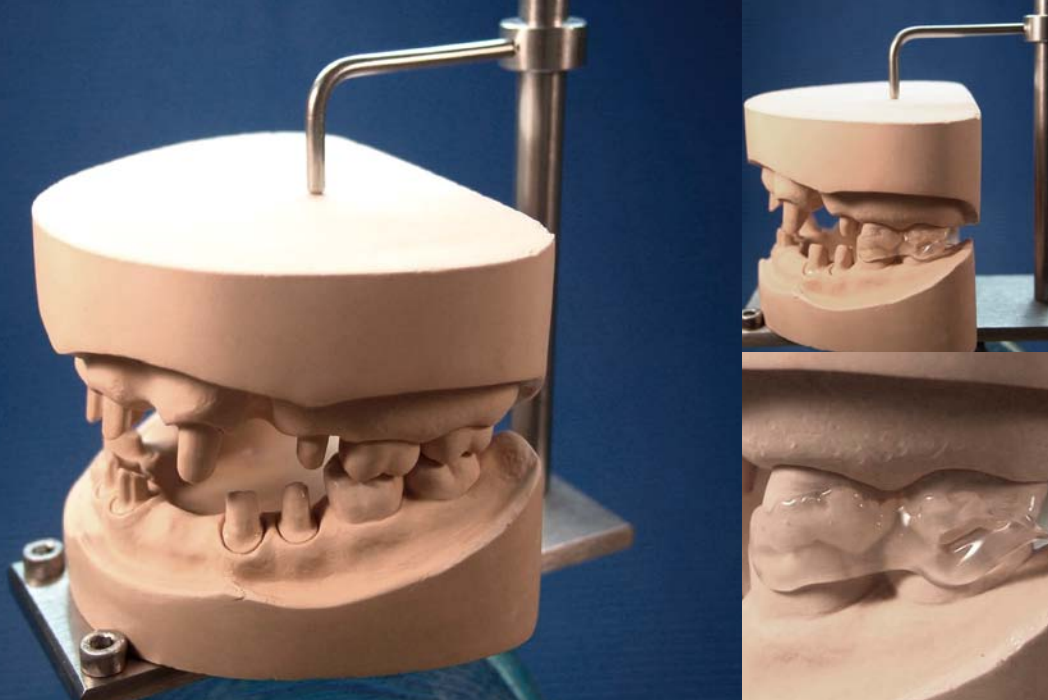

Arbeitsablauf



Fixieren Sie das Modell auf der Quinto Grundplatte, indem Sie den Klemmarm #1 (90° Winkel) leicht auf das Modell drücken.




Je nach Fall verwenden Sie die anderen Arme um die zu fügenden Einzelteile auf dem Modell zu fixieren.



Nun können Sie die Einzelteile verschweißen, verkleben oder mit Kunststoff verbinden und haben beide Hände frei.

BESTELLINFORMATION

| Bestellnummer | Beschreibung | Preis |
|--|---|---------|
| QU100  | Quinto Modellplatte mit Aufnahmeholm inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Klemmarm #1 (zur Modellfixierung) • Klemmarm #2 (ein flacher Winkel) • Klemmarm #3 (zwei flache Winkel) • Schraubgelenkarm #1 (ein 90° Winkel) • Schraubgelenkarm #2 (zwei 90° Winkel) | €249,00 |

Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versand